



INDICACIONES DE USO

Utilícelo cuando el paciente carezca aparentemente de circulación, en casos de:

- Inconsciencia y
- Ausencia de respiración normal y
- Ausencia de pulso o signos de circulación.

Cuando la persona tiene menos de 8 años o pesa menos de 25 kg (55 lb), se debe utilizar la unidad ZOLL AED Plus con los electrodos pediátricos ZOLL AED Plus. No se debe retrasar el tratamiento para determinar la edad o el peso exactos del paciente.

CONTRAINDICACIONES DE USO

NO lo utilice cuando el paciente :

- Esté consciente o
- Esté respirando o
- Tenga pulso detectable u otros signos de circulación.

USUARIO PREVISTO

El desfibrilador externo ZOLL AED Plus debe ser utilizado por personal cualificado y debidamente formado en el uso del dispositivo AED Plus, técnicas básicas de reanimación, técnicas avanzadas de reanimación u otro tipo de respuesta médica autorizada de urgencia para desfibrilar víctimas de paradas cardíacas. La función de monitorización de la RCP incluye un metrónomo que aconseja a los socorristas realizar compresiones de tórax al ritmo de 100 compresiones por minuto recomendado por AHA. Los mensajes visuales y de voz fomentan una profundidad de compresión mínima de 5 cm para víctimas adultas. La función de monitorización de la RCP no está indicada en pacientes menores de 8 años.

ZOLL

ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824-4105
+1 978-421-9655

www.zoll.com